


Instrukcja montażu przystawki Techlife W1

1. Kompletny zestaw dostawki elektrycznej TECHLIFE W1

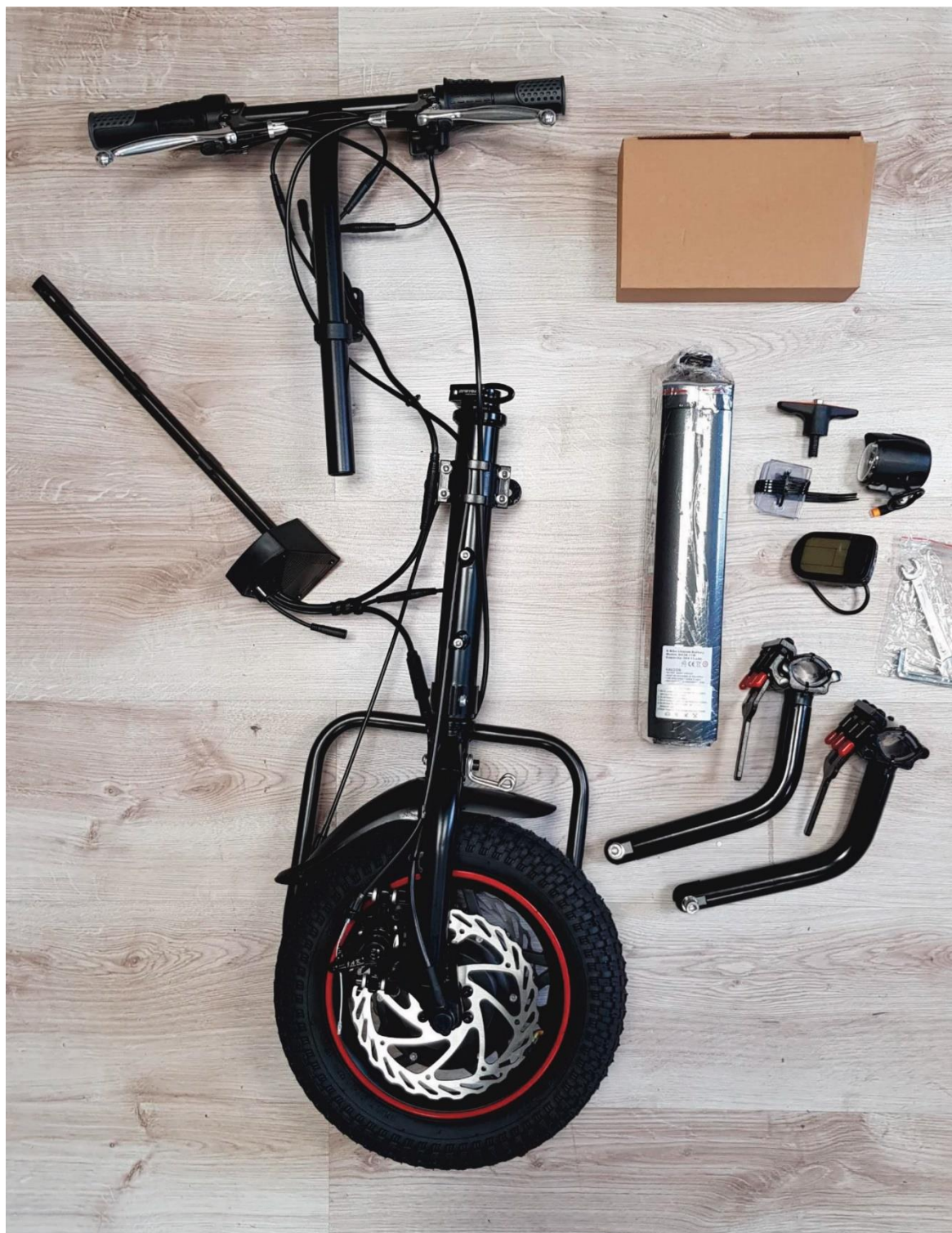

Instrukcja montażu przystawki Techlife W1

2. W pierwszym kroku wkładamy kierownicę w ramę (uważając na przewody)



Instrukcja montażu przystawki Techlife W1

3. W drugim kroku montujemy szynę na baterię do ramy na 2 śruby imbus



Instrukcja montażu przystawki Techlife W1

4. Kolejnym trzecim etapem jest montaż baterii w szynie zamontowanej z poprzedniego kroku



Instrukcja montażu przystawki Techlife W1

5. W piątym kroku montujemy oświetlenie LED przy pomocy dołączonej śruby z nakrętką




6. Szóstym kroku montujemy wyświetlacz LCD oraz przycisk zwalniania blokady na kierownicy oraz podłączamy wtyczkę wyświetlacza



Instrukcja montażu przystawki Techlife W1

7. Montujemy specjalny pomarańczowy „motylek” oraz dwa ramiona przy pomocy klucza płaskiego 13 oraz 6 imbus, które będą trzymały nasz wózek

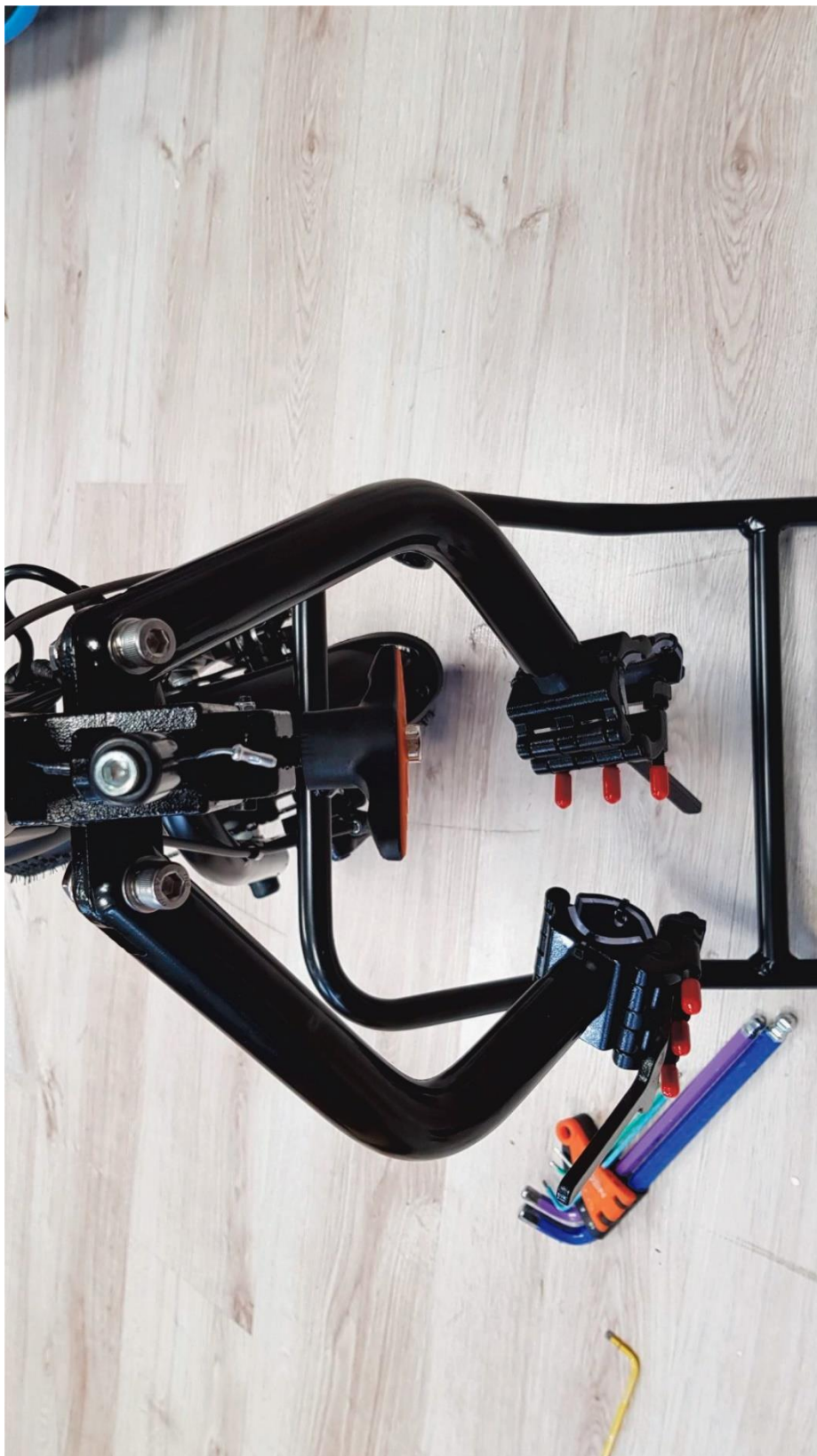

Instrukcja montażu przystawki Techlife W1

8. W ostatnim kroku dopasowujemy zaczepy do naszego wózka inwalidzkiego



Odpinanie wózka inwalidzkiego od dostawki elektrycznej Techlife W1

1. W pierwszym kroku luzujemy nasz pomarańczowy „motylek”



2. Przyszedł czas na drugi krok! Wciskamy klamki hamulcowe i naciskamy nad nimi przyciski blokujące (tzw. Ręczny)



Odpinanie wózka inwalidzkiego od dostawki elektrycznej Techlife W1

3. W ostatnim trzecim kroku przytrzymujemy przycisk z zamkniętą kłódką i wypychamy do przodu TECHLIFE W1 i opuszczamy nasz wózek inwalidzki w dół.

