

# Instrukcja używania

## Napęd elektryczny do wózków inwalidzkich

Model: CNEBIKES WH12A



Napęd elektryczny jest przeznaczony do wózków inwalidzkich ręcznych.  
Podłączenie napędu przekształca wózek inwalidzki ręczny w sposób odwracalny  
w trójkołowy inwalidzki wózek elektryczny



# Parametry techniczne

## **Model**

CNEBIKES WH12A

## **Materiał ramy**

Stop aluminium

## **Silnik**

36v 250W/350W w kole

## **Bateria**

36v 8,8ah, 10,4ah lub 11,6ah

## **Kontroler**

Inteligentny kontroler

## **Ładowarka**

AC 100V-240V, 2amps

## **Opona**

KENDA 12 1/2 \* 2.4

## **Ograniczenie prędkości**

20 km/h

## **Hamulce**

hamulec tarczowy oraz hamulec ręczny

## **Oświetlenie**

Przednie światło LED

## **Wyświetlacz**

Wyświetlacz LCD005

## **Przepustnica**

półzwrotna przepustnica

## **SILNIK**

36V 250W/350W w kole

Maksymalna prędkość ograniczona do 25km/h

Hamulec tarczowy oraz hamulec ręczny



## **BATERIA**

Bateria typu thunder 36V

8.8ah

10.4ah

11.6ah


Akumulator powinien być w pełni naładowany





## PRZEŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA

Konieczne jest przekręcenie wyłącznika bezpieczeństwa, który obsługują hamulec ręczny.

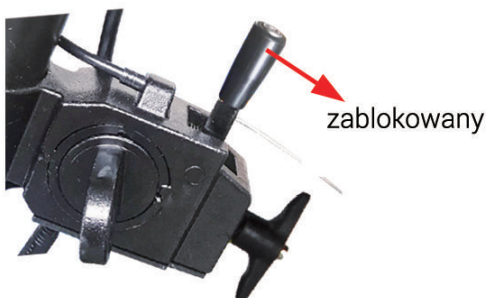

## HAMULEC RĘCZNY

Po zaparkowaniu na zboczu blokada hamulca ręcznego uniemożliwi cofanie się wózka inwalidzkiego.





Wyświetlacz LCD0005, poziomy 1-3 do przodu,  
poziom -1 do tyłu




Idealnie dobrany kształt i długość,  
zapewnia dużo miejsca na nogi.



# INSTRUKCJA

Usiądź na wózku inwalidzkim i podjedź do urządzenia

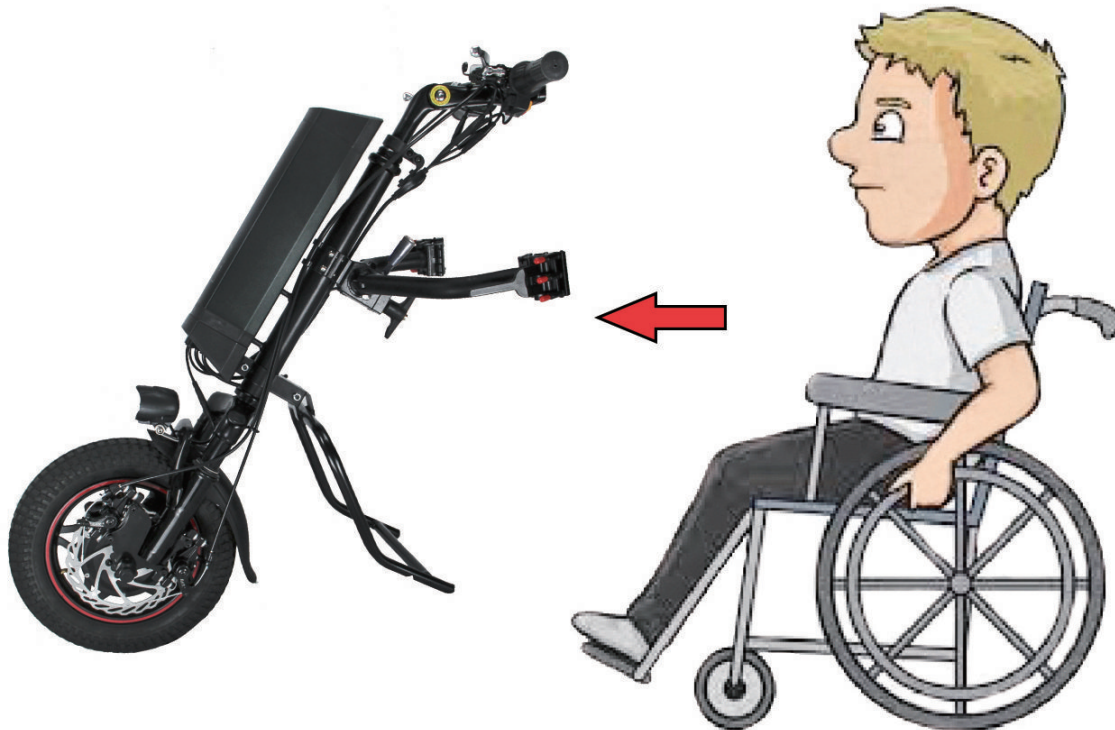

Złącze skrzydłowe do wózka inwalidzkiego  
(\* Najważniejsze jest dostosowanie czerwonej śruby  
do rozmiaru rury wózka inwalidzkiego)



Popchnij kierownicę do przodu, aż przednie koła wózka inwalidzkiego znajdą się nad ziemią.



Dźwignia bezpieczeństwa



Naciśnij przycisk ON/OFF i jedź!

-  
**On/Off**  
+

Ustawienia trybów  
DST: Odległość  
ODO: Przebieg  
VOL: Napięcie akumulatora



# OBSŁUGA I USTAWIENIA WYŚWIETLACZA LCD

## 1. ON/OFF

Przytrzymaj przycisk  długo, aby włączyć zasilanie, przytrzymaj przycisk  po raz drugi, aby wyłączyć pojazd. Kiedy silnik przestanie jeździć i nie będzie używany przez kolejne 5 min, pojazd automatycznie wyłączy się i wyłączy zasilanie silnika.

## 2. PRZEŁĄCZNIK ZMIANY BIEGÓW




Przytrzymaj  lub  krótko, aby przełączyć bieg 1-3. 1 oznacza minimalną moc, a 3 oznacza największa moc. Bieg -1 ma funkcję biegu wstecznego.

## 3. FUNKCJA ASYSTENTA 6KM/H



Przytrzymaj przycisk  oraz  zacznie migać, pojazd pojedzie z prędkością nie większą niż 6km/h. Zwolnij przycisk , funkcja zostanie wyłączona

## 4. FUNKCJA WYCIECZKI

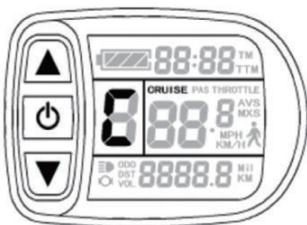

Po włączeniu funkcji wycieczki prędkość pojazdu wyniesi więcej niż 7km/h, przytrzymaj wciśnięty przycisk  i wejdź w CRUISE. Przytrzymaj hamulec lub dowolny przycisk, aby anulować.

## 5. WYŚWIETL I USUŃ POJEDYŃCZE DANE



Po włączeniu zasilania na 5 sekund przytrzymaj jednocześnie przycisk  i , czas jazdy pojedynczej podróży (TM) oraz DST mignie, krótko przytrzymaj przycisk  zawartość obu zostanie wyczyszczona. Jeśli nie uda się przytrzymać przycisku w ciągu 5 sekund, automatycznie powróci do interfejsu wyświetlacza, a oryginalny wygląd zostanie zachowany.

## 6. PRZYTRZYMAJ PRZYCISK , ABY WYŁĄCZYĆ WYŚWIETLACZ I ZASILANIE KONTROLERA

## 7. USTAW PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNĄ



Po włączeniu zasilania na 5 sekund przytrzymaj jednocześnie przycisk ▲ i ▼ wybierz maks prędkość jazdy i przytrzymaj krótko ▼ ,aby ustawić maksymalną prędkość jazdy (domyślnie 25km/h) Przytrzymaj krótko przycisk [power] i pojedź do następnych ustawień parametrów.

## 8. USTAWIENIE ŚREDNICY KOŁA



Sednica koła zostanie ustawiona po zakończeniu ustawiania maksymalnej prędkości jazdy, specyfikacje średnicy koła zaczną migać. Przytrzymaj ▲ lub ▼ krótko, aby ustawić parametry średnicy koła. Wybierz zakres 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,27,700c i 28 cali. Przytrzymaj krótko przycisk [power] i przejdź do następnego ustawienia parametrów.

## 9. USTAW JEDNOSTKI METRYCZNE



Jednostki metryczne zostaną ustawione po zakończeniu ustawienia średnicy kół, km/h oraz km. Przytrzymaj ▲ lub ▼ krótko i wybierz jednostki metryczne prędkości i przebiegu w synchronizacji.

| Widoczność     | Metryczny | Cesarski |
|----------------|-----------|----------|
| Prędkość jazdy | KM/H      | MPH      |
| dystans        | Km        | Mil      |

10. km/h i km przestaną migać po zakończeniu ustawiania jednostek metrycznych.

Przytrzymaj krótko przycisk [power] ,aby ponownie wejść do interfejsu ustawień prędkości lub przytrzymaj długo przycisk [power] ,aby wyjść z ustawień i zapisać wartości.

# OSTRZEŻENIE!!!!!!!!!!

Kiedy jest hamowanie awaryjne, prosimy nie tylko włączać hamulec ręczny, ale także należy zahamować tylne koła wózka inwalidzkiego!

Prosimy nie hamuj gwałtownie, próbuj hamować powoli!!!!!!!!!!

Maksymalna prędkość wynosi domyślnie 20km/h. Jeśli chcesz być szybszy, możesz to zmienić w ustawieniach.

SUGERUJEMY, ABYŚ NIE ROBIŁ TEGO ZBYT SZYBKO!!



Dane autoryzowanego przedstawiciela w Polsce:

AirwheelPoland S.C.

41-800 Zabrze, ul. Wolności 63

NIP. PL9691616598,

REGON: 363321013

[www.Airwheel.pl](http://www.Airwheel.pl)

Tel. +48 570 876 092

Tel. Serwis. +48 515 252 443



Data wydania  
Grudzień 2018r

# CIESZ SIĘ JAZDĄ!

Wytwórca:

CNEBIKES CO.,LTD

ADD: No 3, Renmin west road,wujin district,

Changzhou city,Jiangsu,China

Tel: +86-85809291 Fax:+86-85801633

Strona internetowa: [www.cnebikes.com](http://www.cnebikes.com)